



I. AINARA NEDİR?

Ainara; gebelik sırasında, doğum sonrasında, menopoz sırasında veya fiziksel veya kimyasal tahriş veya normal vajinal floranın değişmesi sonucu veya oral kontraseptiflerin ya da diğer ilaçların kullanımı ile ilişkili ortaya çıkabilecek vajinal kuruluk semptomlarının, atrofi ve ilişkili rahatsızlığın giderilmesi için vulvovajinal kullanıma yönelik bir mukoadezif nemlendirici jeldir.

Vulvovajinal kuruluk; östrojen düzeylerindeki azalma sonucu veya normal vajinal mikrofloranın fiziksel veya kimyasal iritasyonu veya değişimi sonucu vajinanın doğal nemlenmesinde bir azalma olması nedeniyle meydana gelir. En sık görülen vajinal rahatsızlıklar kaşıntı, iritasyon, yanma ve disparoniidir (cinsel ilişki sırasında ağrı).

Ainara, bileşiminde biyoadezif moleküllerin bulunması nedeniyle, uygulama sonrasında kalıntı veya leke bırakmaksızın mukozayı nemlendirerek vajinal duvar üzerinde hidrate ince bir film oluşturur.

Ainara su bazlı bir jeldir, kokusuzdur, şeffaftır ve homojen yapıdadır.

İyi tolere edilir.

Kondom kullanımına uygundur.


II. AINARA NASIL KULLANILIR?

Ainara'yı kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ainara'yı uygularken, jeli vajina içine sürmek için önceden 1 g jel doldurulmuş aplikatörü kullanınız.

Ainara'yı haftada iki kez kullanmanız önerilir veya gerektiği takdirde 12 hafta boyunca günlük olarak kullanılabilir. Semptomların devam etmesi halinde hekiminize danışınız.

Aşağıdaki resimde, tüp ve aplikatörün farklı elemanlarını görebilirsiniz.

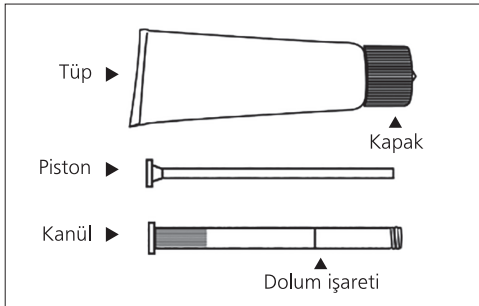

1. Tüpün kapağını çıkartınız, tersini çevirerek sivri ucu tüpün boynundaki mührü delmek için kullanınız.




2. Aplikatörü çıkarınız ve tüpün ucuna vidalayınız.




3. Piston durana kadar (dolum işaretinde), aplikatörü doldurmak için tüpü sıkınız.



4. Aplikatörü tüpten ayırınız ve tüpün kapağını takınız.

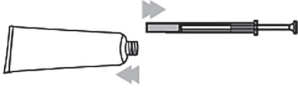

5. Jeli uygulamak için uzanınız, aplikatörün ucunu vajina içine derine doğru sokunuz ve yavaşça, pistonu sonuna kadar itiniz.

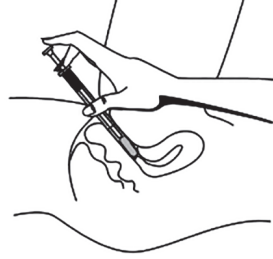

6. Kullanımdan sonra pistonu kanülün içinden çekerek çıkartınız, sonraki uygulamada tekrar kullanabilmek için kanülü ve pistonu temiz suyla iyice yıkayınız.



Ainara, vulva kuruluşunu gidermek için perineal bölgeye de (vajina ağız ve bitişiğindeki dış genital organ) uygulanabilir. Bu kullanım, cinsel ilişkiyi de kolaylaştırabilir.

III. AINARA'NIN İÇERİĞİ?

Gliserol (E422), Sodyum metil parahidroksibenzoat (E219), Sodyum propil parahidroksibenzoat (E217), polikarbofil, karbopol, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, saf su. Parfümsüzdür.

IV. AINARA KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda Ainara kullanımı kontrendikedir.

Yutmayınız. Gözlerle temasından kaçınınız. Temas etmesi durumunda suyla yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerde saklayınız.

Ürünle ilgili herhangi bir ciddi olay, üreticiye (Italfarmaco S.A.) ve hastanın ve/veya üreticinin yerleşik olduğu yetkili makama bildirilmelidir.

V. AINARA'NIN SAKLANMASI

Oda sıcaklığında saklayınız, doğrudan ısı almasını önleyiniz.

AINARA'yı, kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ürün paketi hasarlı ise bu ürün kullanılmamalıdır.

VI. AINARA'NIN GÖRÜNÜMÜ

30 g tüp (aplikatörüyle beraber) **Tıbbi Cihaz.**

İthalatçı:

ITF İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Mah. Bağlar Cad. D Blok No:14D İç Kapı No:13 Kağıthane/İstanbul

Üretici: Italfarmaco S.A.

C/San Rafael 3, 28108 Alcobendas (Madrid/İspanya)



Son revizyon tarihi: 2021/05